

特許出願中

トレーニンググローブ

むすんでひらいて®

素材	
掌 部	人工皮革
甲 部	ポリエステル 80%
	ナイロン 20%
マジック	ナイロン 100%
伸縮部分	スパンポリウレタンゴム
Sカン結合	鉄


ご使用上の注意

ご使用中にお肌に刺激を感じたり、かゆみや痛み発疹などを感じた場合は速やかに使用を中止し医師に相談してください。

また、指や手のひら、甲等に異常を感じた場合は即刻、使用を中止してください。

ご利用の手順

- 指先までしっかり入れてください。
- 指を折り曲げた状態で手首のマジックテープに貼り付けてください。
- 手首がしまりすぎない様に、マジックテープを閉じてください。
- 着用の際、指が入りづらい場合には、手の入口から引っぱらないで指先から順に入れてください。
- 装着後、手を閉じたり、開いたり
の反復運動を行ってください。
- 脱ぐ際は、五指の先から少しずつ
手袋を引き、最後に手袋の先を持ち、
ゆっくり引っぱってください。

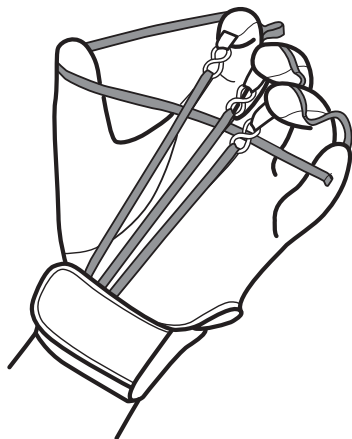

ご注意：一方に力がかかると破れることがあります。

*伸縮ゴムが劣化した場合はゴムを交換してください。Sカン部分から、かんたんに脱着可能です。(ゴム別売)

洗濯上の注意

- 素材の風合いを保つために中性洗剤を使用し、水または40℃ぐらいのぬるま湯で、手洗ひまたはネットに入れて洗濯機で洗ってください。
- 乾燥の際、縮む恐れがありますので、脱水機で水を切り、形を整えて、日陰で吊り干しにしてください。
- タンブル乾燥機のご使用はお避けください。
- 色布は塩素系漂白剤のご使用はお避けください。



有限
会社 中田久吉商店
香川県東かがわ市白鳥1018番地1
<http://www.e-nakata.jp>

日本製